

PLANOS Y ESTAMPADOS

Planos de relajación acrílico

1. Impresiones con alginato o silicona. El doctor debe enviar antagonista y registro de mordida.
2. Plano en cera.
3. Prueba del plano en cera en clínica.
4. Terminación de plano.

Planos de relajación acetato más acrílico

1. Impresiones con alginato o silicona. El doctor debe enviar antagonista y registro de mordida.
2. Plano en cera sobre estampado de acetato.
3. Prueba de plano en cera en clínica.
4. Terminación de plano.

Planos de relajación Duro Blando de 3 ó 4mm

Planos de relajación Duro Duro de 3 ó 4mm

1. Impresiones con alginato o silicona. El doctor debe enviar antagonista y registro de mordida.
2. El montaje se realiza en el laboratorio en la estampadora especialmente diseñada para este tipo de plano. En este tipo de plano, no requiere ser probado. Se envía terminado.

Nota: este tipo de plano es el de más rápida confección que el laboratorio posee, es muy comfortable ya que al ser una lámina doble la zona interior blanda de silicona queda en contacto con los dientes y la parte dura con el antagonista (en el caso de los planos Duro Blando).

NOTA: Si la impresión es tomada en alginato, el vaciado se debe realizar inmediatamente con yeso extra duro tipo 4.

Orientación sobre este tipo de pedidos a:

protesisremovible@beraudent.cl o
al+5693241 0043



¿Le interesa aprender más?

En Beraudent nos interesa compartir nuestro conocimiento, para ello hemos desarrollado un ciclo de charlas con distintos temas de aplicación clínica. Las charlas son dictadas por técnicos altamente especializados en cada una de las áreas de producción del laboratorio. **Agende su cita a formacion@beraudent.cl**

